

Produktinformation

Demotec 90, 2er-Pack, zur Klauenbehandlung bei Rindern Klauenbehandlung bei Kühen und Rindern

Art-Nr.: 07-061 / GTIN: 4026405063026 / Marke: [Demotec](#)



Demotec®

UVP 28,60 EUR

27,90 EUR / Stück

Grundpreis: 13,95 EUR / St

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

NICHT VORRÄTIG • Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

Demotec 90 ist ein schnellhärtender Kunststoff in Form von Pulver und Flüssigkeit mit allem erforderlichen Zubehör wie universell einsetzbare Holzklötze, Anmischbecher und Holzspatel. Der Kunststoff lässt sich einfach, schnell und angenehm anmischen und verarbeiten.

Produktinformation

Durch eine besondere Materialkombination hat Demotec 90 schon 2 Minuten nach dem Anmischen eine leicht pastöse Beschaffenheit und kann dann bereits auf Klaue und Holzklötz aufgebracht und nahezu klebefrei in die gewünschte Form modelliert werden. Hierbei hat es sich bewährt, die Hände mit Wasser und Seife anzufeuchten, um ein Kleben des Kunststoffes an der Hand auszuschließen. Je nach Temperatur ist der Kunststoff nach 4 bis 6 Minuten völlig ausgehärtet und kann nach dem Erkalten voll belastet werden.

In der Regel erkranken die Rinder nur an einer der beiden Klauen. Während die erkrankte Klaue medizinisch behandelt wird, wird an der gesunden und belastungsfähigen Klaue mit dem Spezialkunststoff Demotec 90 ein Holzklötz angeklebt. Durch diese Erhöhung der gesunden Klaue wird die kranke Klaue entlastet und ruhig gestellt. Diese Druckentlastung führt wieder zu einer normalen Gangart des Tieres und fördert die rasche Ausheilung.

Neben diesem Einsatz bei Großtieren kann Demotec 90 z. B. auch zur extrakutanen Schienung von Knochenfrakturen bei Kleintieren eingesetzt werden.

Vorteile:

- . Schnelle Reduzierung von Lahmheiten
- . Keine Verringerung der Milchleistung
- . Kaum Gewichtsverluste
- . Leichte und angenehme Verarbeitung
- . Gutes Preis-Leistungsverhältnis

Technische Daten:

- . Material: Buchenholz
 - . Farbe: Natur
 - . Länge: 112 mm
-

Produktinformation

- . Stärke: 23 mm
- . Rillung: 3 mm

Anwendungsbereiche:

- . Zur Behandlung von Lahmheiten bei Kühen und Rindern
- . Auch zur extrakutanen Schienung von Knochenfrakturen bei Kleintieren

Lieferumfang:

- . 1x Demotec Klauenklötzchen links
- . 1x Demotec Klauenklötzchen rechts
- . 2x Demotec Pulver 70g
- . 1x Demotec Flüssigkeit 80ml
- . 1x Anmischbecher
- . 2x Holzspatel
- . 1x Gebrauchsanweisung



Gefahrenhinweise Flüssigkeit:

Signalwort: Gefahr!

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H315: Verursacht Hautreizungen.

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H335: Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise Flüssigkeit:

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Produktinformation

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.



Gefahrenhinweise Pulver:

Signalwort: **Achtung!**

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sicherheitshinweise Pulver:

P260: Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P341: Bei Atembeschwerden an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
