

Produktinformation

Technovit 6091, Pulver 1000g, zur Klauenbehandlung von Rindern

Art-Nr.: 07-041 / GTIN: 4018653160237 / Marke: [Technovit](#)



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

UVP 87,70 EUR

75,90 EUR / Stück

Grundpreis: 75,90 EUR / kg

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

NICHT VORRÄTIG • Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

Technovit 6091 ist wohl der weltweit bekannteste Kunststoff, der in der Veterinärmedizin als universelles Hilfsmittel eingesetzt wird. Seine Anfänge liegen bereits in den späten 50er Jahren. Schon damals wusste man um die wirtschaftlichen Folgen klauenerkrankter Tiere. Und auch heute noch erfreut sich

Produktinformation

Technovit 6091 ständig wachsender Beliebtheit und hat sich seitdem millionenfach in der täglichen Praxis bewährt. Das mag zum Einen an der einfachen Anwendung liegen (Anrühren - Aufbringen - Aushärten), zum Anderen aber auch an den hervorragenden Ergebnissen, die mit Technovit 6091 erzielt werden.

Wirkungsweise:

In der Regel erkranken die Rinder nur an einer der beiden Klauen. Während die erkrankte Klaue medizinisch behandelt wird, wird an der gesunden und belastungsfähigen Klaue mit dem Spezialkunststoff Technovit 6091 ein Holzklotz angeklebt. Durch die Erhöhung der gesunden Klaue wird die kranke Klaue entlastet und ruhig gestellt. Diese Druckentlastung führt wieder zu einer normalen Gangart des Tieres und fördert die rasche Ausheilung.

Materialeigenschaften:

Technovit 6091 ist ein schnellhärtender Kunststoff auf MMA-Basis. Durch die besondere Materialkombination hat der Kunststoff schon wenige Minuten nach dem Anmischen eine teigähnliche Konsistenz und kann sofort auf Klaue und Holzklotz aufgebracht und in die gewünschte Form modelliert werden. Je nach Außentemperatur ist der Kunststoff nach 4 bis 6 Minuten völlig ausgehärtet und kann nach dem Erkalten voll belastet werden. Nach einer Behandlungsdauer von knapp 10 Minuten, kann das Tier bereits schmerzfrei gehen! Keine Temperaturbelastung! Die Reaktionswärme beträgt max. 86 °C und ist somit geringer als bei vergleichbaren Produkten. Begünstigt durch die schlechte Wärmeleitfähigkeit des Klauenhorns steigt die Temperatur an der Lederhaut nicht über 39 °C.

Vorteile:

- Schnelle Heilung von Lahmheiten
-

Produktinformation

- . Hohe Wirtschaftlichkeit: keine Verringerung der Milchleistung, keine Gewichtsverluste
- . Leichte und angenehme Verarbeitung des Kunststoffes: Verringerung der Aushärtezeit, ohne Anstieg der Polymerisationstemperatur durch Verwendung des Beschleunigers! Individuelle Anpassung der Aushärtezeit an die eigene Arbeitsweise / Geschwindigkeit
- . Klauenschonend: schonendes Verfahren im Vergleich zu herkömmlichen Produkten, durch die geringe Polymerisationstemperatur. Nach Beendigung des Heilungsprozesses kann das Material ganz leicht, ohne Schädigung der Klaue, wieder entfernt werden
- . Optimale Tragestabilität: Material zeichnet sich durch besonders hohe Schlagzähigkeit aus
- . Hoher Tragekomfort: Technovit 6091 ist durch seine Biegefestigkeit optimal auf den Bewegungsablauf der Kuh eingestellt

Anwendungsgebiete:

- . Zur Ruhigstellung von Klauen bei Entzündungen
- . Zur Fixierung von Klauenspitzen
- . Abdeckung von Hufdefekten (Hornspalten)
- . Formgebung des Hufs
- . Orthopädische Hufbehandlung

Lieferumfang:

- . 1x Technovit Pulver 1000g



Gefahrenhinweise Pulver:

Produktinformation

Signalwort: Entfällt.

H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise Pulver:

P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P501: Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.